



Medical

# Filtri acqua Pall-Aquasafe™

## Filtri acqua monouso per 31 giorni di utilizzo - rubinetto

### Utilizzo del filtro

- Il filtro (AQ31F1S/AQ31F1R) deve essere posizionato in modo tale da ridurre al minimo gli schizzi verso l'alto dell'acqua.
- Il filtro deve essere manipolato asetticamente durante l'installazione e non deve essere toccata l'uscita durante l'utilizzo.
- La superficie esterna del filtro e dei connettori può essere pulita con agenti sanitizzanti contenenti alcol, composti di ammonio quaternario, benzil ammonio cloruri, ioduri e surfattanti non-ionici.
- È possibile una riduzione della portata d'acqua a causa dell'elevata presenza di particolato.
- Mentre il filtro è in uso non deve essere rimosso, poiché questo potrebbe comportare la contaminazione della parte a valle e l'ingresso di aria nel filtro, che potrebbe causare un blocco e ridurre in modo significativo il flusso dell'acqua.
- I filtri utilizzati devono essere smaltiti secondo le normative locali.

NOTA: questo prodotto non contiene lattice di gomma naturale

Per maggiori informazioni sui connettori più appropriati, contattare Pall o un suo rappresentante.

Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni d'uso.

### Informazioni per l'ordine

Codice	Descrizione	Confezione
AQ31F1S	Filtro per Acqua Pall-Aquasafe durata 31 giorni - rubinetto (con uscita liscia)	12 unità per confezione
AQ31F1R	Filtro per Acqua Pall-Aquasafe durata 31 giorni - rubinetto (con uscita diffusore-doccia)	12 unità per confezione

### Adattatori ad attacco rapido

Adattatore	Descrizione	Confezione
TAP1/2MN	½ pollice, filetto maschio, senza valvola	1 unità
TAP1/2MV	½ pollice, filetto maschio, con valvola	1 unità
TAP1/2FN	½ pollice, filetto femmina, senza valvola	1 unità
TAP1/2FV	½ pollice, filetto femmina, con valvola	1 unità
TAP22FN	22 mm, filetto femmina, senza valvola	1 unità
TAP22FV	22 mm, filetto femmina, con valvola	1 unità
TAP24MN	24 mm, filetto maschio, senza valvola	1 unità
TAP24MV	24 mm, filetto maschio, con valvola	1 unità
TAPUC	Universale (15-29 mm), non filettato	1 unità



1

- Rimuovere l'aeratore/riduttore di flusso dall'uscita filettata del rubinetto.



2

- Scegliere il raccordo rapido appropriato\* e attaccarlo all'uscita del rubinetto.



3

- Assicurarsi che la guarnizione sia ben posizionata nella scanalatura dell'attacco d'ingresso del filtro.
- Spingere il filtro all'interno dell'uscita del connettore rapido. Quando in sede, si avverte un "click" di conferma.



4

- L'etichetta trasferibile può essere staccata come tracciabilità dei dati e della sostituzione del filtro secondo procedura.
- Rimuovere la capsula blu dall'uscita del filtro.



5

- Completare le informazioni con inizio (⊙) e termine (●) di utilizzo, secondo procedure.



6

- I filtri per acqua Pall-Aquasafe (AQ31F1S / AQ31F1R) possono essere utilizzati per almeno 31 giorni.
- Per sostituire il filtro, premere il grilletto del connettore per permetterne il rilascio.



- NON contaminare l'uscita del filtro



- Le superfici esterne possono essere sanitizzate solo dal personale addetto e nel rispetto di quanto indicato sulle guide d'utilizzo del produttore.



- NON depositare il filtro sul fondo del lavandino o su superfici contaminate.



Pall Italia s.r.l., Via Emilia, 26, 20090 Buccinasco - MI - Italia  
Tel +39 02 488870 1  
Fax +39 02 4880014

[www.pall.com/healthcarewater](http://www.pall.com/healthcarewater)

© 2009, Pall Europe Limited. I codici indicati sono protetti da copyright di Pall Europe Limited. Pall, e Pall-Aquasafe sono marchi di fabbrica di Pall Corporation.  
® indica marchi registrati in USA, e ™ indica marchi registrati "common law".

PELWR/SM/GN 09.3113/03.2009

Collegamento rapido, protezione immediata



Medical

# Filtri per acqua Pall-Aquasafe™

## Filtri per acqua monouso per 31 giorni di utilizzo - Doccia

### Utilizzo del filtro

- Il filtro (AQF4) deve essere posizionato in modo tale da ridurre al minimo gli schizzi verso l'alto e, dove possibile, il filtro deve restare sull'apposito sostegno.
- Il filtro deve essere manipolato asetticamente durante l'installazione e non deve essere toccata l'uscita durante l'utilizzo.
- La superficie esterna del filtro e dei connettori può essere pulita con agenti sanitizzanti contenenti alcol, composti di ammonio quaternario, benzil ammonio cloruri, ioduri e surfattanti non-ionici.
- È possibile una riduzione della portata d'acqua a causa dell'elevata presenza di particolato.
- Mentre il filtro è in uso non deve essere rimosso, poiché questo potrebbe comportare la contaminazione della parte a valle e l'ingresso di aria nel filtro, che potrebbe causare un blocco e ridurre in modo significativo il flusso dell'acqua.
- I filtri utilizzati devono essere smaltiti secondo le normative locali.

NOTA: questo prodotto non contiene lattice di gomma naturale.

Per maggiori informazioni sui connettori più appropriati, contattare Pall o un suo rappresentante.

Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni d'uso

### Informazioni per l'ordine

Codice	Descrizione	Confezione
AQF4	Filtro integrato per doccia Pall-Aquasafe Monouso - Durata 31 giorni	12 unità per confezione
Quick Connect Adaptors		
SH01/2MVR	Con valvola, con riduzione per acqua ad alta pressione	1 unità
SH01/2MNR	Senza valvola, con riduzione per acqua ad alta pressione	1 unità
SH01/2MVN	Con valvola, senza riduzione per acqua a bassa pressione	1 unità
SH01/2MNN	Senza valvola, senza riduzione per acqua a bassa pressione	1 unità

† Si consiglia l'uso della riduzione nel caso di pressione dell'acqua superiore ai 3 bar.



1

- Rimuovere l'esistente parte terminale della doccia (soffione) dal tubo flessibile.



4

- Completare le informazioni con inizio (⌚) e termine (🕒) di utilizzo, secondo procedure.



2

- Scegliere il raccordo rapido appropriato\* e attaccarlo all'uscita del tubo flessibile della doccia, assicurandosi che la guarnizione sia in sede.



5

- I filtri per acqua Pall-Aquasafe (AQF4) possono essere utilizzati per almeno 31 giorni.



3

- Spingere il filtro all'interno dell'uscita del connettore rapido. Quando in sede, si avverte un "click" di conferma.




6

- Per sostituire il filtro, premere il grilletto del connettore per permetterne il rilascio.



- NON contaminare l'uscita del filtro

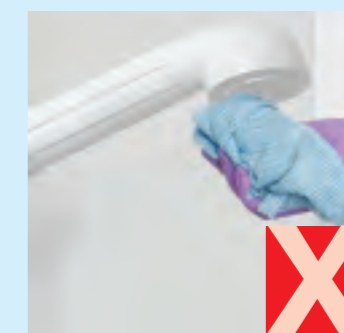

- Le superfici esterne possono essere sanitizzate solo dal personale addetto e nel rispetto di quanto indicato sulle guide d'utilizzo del produttore.



- NON depositare il filtro sul piatto doccia, sul pavimento, nella vasca e su superfici contaminate in genere.



Pall Italia s.r.l., Via Emilia, 26, 20090 Buccinasco - MI - Italia  
Tel +39 02 488870 1  
Fax +39 02 4880014

[www.pall.com/healthcarewater](http://www.pall.com/healthcarewater)

© 2009, Pall Europe Limited. I codici indicati sono protetti da copyright di Pall Europe Limited. (PALL), Pall, e Pall-Aquasafe sono marchi di fabbrica di Pall Corporation. ® indica marchi registrati in USA, e ™ indica marchi registrati "common law".

PELWR/SM/GN 09.3113/03.2009

Collegamento rapido, protezione immediata